

ANVÄNDARINSTRUKTION

C-LETZ steril konturelektrod för gynekologisk diatermikonisering

Denna rotationselektrod används för gynekologisk C-LETZ = Contoured Loop Excision of the Transformation Zone. Elektroden finns i fyra modeller med olika kontur (förhållande djup och radie) för ektocervikalt resp. endocervikalt ingrepp. Konturerna följer ett förutsägbart mönster för CIN-lesionen. C-LETZ elektroden skär med en volframtråd som är endast 0,3 mm i diameter och har hög värmeledningsförmåga och hållfasthet. Detta ger exakt dissektion med minimal koagulationsnekros. Vävnadskonerna blir "nativa" och lätta att diagnosticera i PAD. En fördel med C-LETZ är att metoden är vävnadssparande.

C-LETZ rotationselektrod (mått anges i mm)

Art nr	Färg	Djup	Radie	Skaft	Fattning diameter	Antal/förp
DCE-110	Blå	23	15	150	2,4	10
DCE-115	Grön	18	11	150	2,4	10
DCE-120	Beige	10	12	150	2,4	10
DCE-125	Gul	13	9	150	2,4	10

Elektroden passar till alla fabrikat av generatorer med fotpedal samt pennor med 2,4 mm fattning.

Elektrodmaterial

Slyngtråd	Volfram 0,3 mm diam.
Skaft	Rostfritt stål
Isolering	Polypropylen

Bruksanvisning

C-LETZ tekniken innebär att elektroden införs i cervixkanalen och roteras 360 grader. Metoden är snabb och reproducerbar samt underlättar PAD eftersom preparatet utgörs av en enda väldefinierad vävnadskon. Fotpedal måste användas för att man ska kunna rotera pennan med C-LETZ elektroden ett fullt varv 360 grader. Ställ in generatoren på CUT eller BLEND 1 vid den uteffekt (ca 60 W) som operatören bedömer som optimal. Uteffekten anpassas till elektrodens storlek, vävnadens beskaffenhet och snitthastigheten.

Litteratur: Miniconization procedure with C-LETZ conization electrode for treatment of cervical intraepithelial neoplasia: A Swedish study. M Mints, V Gaberi & S Andersson. Acta Obstet. et Gynecol. 2006; 85: 218-223

Observera

- Fotpedal måste användas vid operation med C-LETZ tekniken.
- Volframtråden får ej vridas/böjas.
- Direkt kontakt med oisolerade instrument i metall kan skada volframtråden.
- Använd isolerade kirurgiska spekula och instrument.
- Rengör med fuktad gasväv. Använd aldrig slipmedel.
- Max uteffekt 150 watt.
- **Får ej omsteriliseras eller återanvändas.**

CORTEC MEDICAL AB, Kanalгатan 3, 211 40 Malmö, tel 040 664 59 50, fax 040 788 63

www.cortec.com

Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.