

ANVÄNDARINSTRUKTION

BLODFILTER

Blodfilter 18 µ, Hemo-nate (Utah Medical)

Hemo-nate är ett blodfilter för mikrofiltrering av blod, blodprodukter och andra lösningar för infusion till neonatalpatienter. Engångsfiltret är tillverkat av rostfritt stål och filtrerar effektivt bort mikroaggregat och partiklar som är 18 µ och större. Hemo-tap anslutningen som ingår i Hemo-nate SET används för direkt anslutning till blodpåse utan administrationsset, varefter önskad blodvolym sugas in i medföljande spruta. Det finns även ett medföljande Luer förslutningslock som appliceras på sprutan efter dess fyllning för att denna ska kunna transporteras sterilt till patienten. Noggranna studier har visat att cellulära komponenter i helblod ej skadas vid filtreringen.

Hemo-nate blodfilter levereras med / utan SET. I SET ingår Hemo-tap anslutning, spruta samt en Luer förslutningshylsa till sprutan. Se nedan

Art nr	Blodfilter 18 µ, Hemo-nate	Antal per förp
4020009	Blodfilter 18 µ	50
4020005	Blodfilter SET 18 µ	50

BRUKSANVISNING

Följande procedur ska göras aseptiskt.

1. Öppna förpackningen, ta ut Hemo-tap anslutningen och stäng kranen.
2. Ta bort skyddshöljet på Hemo-tap spetsen och tryck in spetsen i blodpåsen.
3. Skruva av det vita skyddslocket från krananslutningen.
4. Sprutan levereras med monterat filter.
5. Ta ut sprutan med filter från förpackningen och skruva på den på krananslutningen.
6. Öppna kranen och fyll sprutan med önskad volym blod genom filtret.
7. Stäng kranen, skruva av sprutan och skruva på det vita skyddslocket på krananslutningen.
8. Skruva av filtret från sprutan och administrera vätskan i sprutan.
9. Om sprutan ska transporteras, skruva på det röda förslutningslocket på sprutan.
10. Filtret, sprutan och krananslutningen slänges i riskavfallet.

Mängden aggregat i blodet kan påverka filtrets kapacitet. Om filtreringen går långsamt indikerar detta att filtrets kapacitet överskridits och filtret bör bytas.

OBSERVERA

- Kontrollera att förpackningen är oskadad och att utgångsdatum ej passerats.
- Innehållet får ej omsteriliseras eller återanvändas.

CORTEC MEDICAL AB, Kanalgatan 3, 211 40 Malmö, tel 040 664 59 50, fax 040 788 63
www.cortec.com

Tillverkas av Utah Medical Products Inc., U.S.A.