

# ANVÄNDARINSTRUKTION

## **PATHFINDER, art nr PA701**

**Pathfinder** är ett sterilt spolningssystem för endoskopi och ger konstant flöde alternativt "bolus" flöde när operatören så önskar.

- hanteras med en hand av operatören
- spolningshastigheten regleras med ett handtryck
- ger ett konstant flöde med önskad hastighet
- installeras "in-line" mellan endoskopet och spolvätskan
- passar alla varianter av endoskop

### Bruksanvisning

**Pathfinder** är en steril produkt och skall användas aseptiskt. **Pathfinder** består av en cylinderformad kammare med kulventiler i varje ände samt en kort och en lång anslutning. Pilarna på kammaren visar flödesriktningen.

1. Pathfinder installeras "in-line" mellan spolvätskan och endoskopet.
2. Den korta anslutningen ansluts till spolvätskan.
3. Fyll kammaren med spolvätska och tryck försiktigt på den för att tömma ut luft.
4. Anslut sedan den långa anslutningen till endoskopet.
5. Tryck på kammaren när ökat flöde önskas.